

## ტოტალ ცე რამი

### აუტომიქსი/ ორმაგი მკურნალობა

წებო ცემენტი კერამიკაზე თვითდამუშავების და თვითწებადი ეფექტით

დამახასიათებელი თვისებები:

ტოტალ ცე რამი არის წებო ცემენტი კერამიკაზე თვითდამუშავების და თვითწებადი ეფექტით სპეციალური ფორმულით კერამიკაზე ცემენტირებისათვის.

მოხმარების ინსტრუქცია

1. გამოიღეთ დროებითი აღმდგენი. შენიშვნა: გამოიყენეთ მხოლოდ დროებითი ცემენტი ევგენოლის გარეშე. ევგენოლის შემცველი დროებითი დასამკლომბი მასალის გამოყენებამ შესაძლოა ხელი შეუშალოს ტოტალ ცე რამი-ს პოლიმერიზაციის პროცესს. 2. ფრთხილად გაავლეთ წყალში.

3. გააშრეთ ეს შემადგენლობა ჰაერზე (არ გამოაშროთ) 4. რესტორაციის პროცესში ეცადეთ უზრუნველყოთ კარგი რეგულირება. 5. პირველ მოხმარებამდე გაწმინდეთ კარტუში. განათავსეთ შესარევი წვერო ავტომატური შერევის შპრიცზე. 6. მასალის განაწილება შესაძლოა მოხდეს შემდეგნაირად: ჩასადები მასალა / კბილის პროთეზი, რომელიც ფარავს კბილს. ინტრა ორალური წვერო მიმართეთ შპრიცის წამოსაცმელისკენ, რომელზეც მოთავსებულია ნაერთი, ცემენტი პირდაპირ მიმართეთ წინასწარ მომზადებული ღრუსკენ და მთლიანად დაფარეთ მთელი ზედაპირი. მასალა ფრთხილად ჩაჭედეთ პრეპარირებულ ადგილას ისე, რომ ცემენტი გადმოვიდეს ყველა მხრიდან. გვირგვინი: გაანაწილეთ ცემენტი აღსადგენ ადგილას ანდა კბილის პრეპარირებულ ადგილზე მთლიანი ზედაპირის დაფარვით. მასალა ფრთხილად ჩაჭედეთ პრეპარირებულ ადგილას ისე, რომ ცემენტი გადმოვიდეს ყველა მხრიდან. შენიშვნა: დამუშავების დრო მერყეობს 1-დან 2 წუთამდე; დალოდება ხდება 3 წუთის მანძილზე (პირის ღრუს ტემპერატურაზე). 7. როდესაც რესტორირება დასრულდება, მასალა კარგად ჩაიბეჭდება, კიდებიდან მოაშორეთ ზედმეტი ცემენტი. ცემენტის ნარჩენები უკეთესად სცილდება მინადულის მოსაცილებელი პრეპარატით ანდა ექსპლორატორით როდესაც ისინი გელის ფორმით არიან. ასეთი ფორმის მიღება შესაძლებელია კიდებზე დარჩენილი ნარჩენების 2 წამის განმავლობაში ფოტოპოლიმერიზაციით ანდა ოტო-პოლიმერიზაციით ცემენტის ჩაბეჭდვის შემდეგ, წუთნახვერიდან ორი წუთის მანძილზე. საუკეთესო შედეგის მისაღებად დატოვეთ წუთნახვეარი პოლიმერიზაციამდე. 8. როდესაც მოაშორებთ ცემენტის ნარჩენებს, განათების თანხლებით 20 წამის განმავლობაში პოლიმერიზირება გაუკეთეთ მთლიან ზედაპირსა და კიდებს. 9. პროქსიმალური ზონებისთვის გამოიყენეთ ნემსის სულ ბოლო წვერო. დისკების ან გასაპრიალებელი კონუსის მეშვეობით გააპრიალეთ კიდები. 10. შეამოწმეთ ოკლუზია.

### გაფრთხილება

მეტაკრილატის წებომ, რომელიც არ არის პოლიმერიზირებული, შესაძლოა გამოიწვიოს კონტაქტური დერმატიტი და ზიანი მიაყენოს პულპას. მოერიდეთ კანთან, თვალბთან და რბილ ქსოვილებთან კონტაქტს. ამ მასალასთან შეხების შემთხვევაში, წყლით კარგად გამოირეცხეთ.

შენიშვნა: ავტომატური შერევის წვეროები მხოლოდ ერთჯერადად გამოყენებისთვისაა განკუთვნილი.

### შენახვის პირობები და კონსერვაციის პერიოდი

არ შეინახოთ 24 C/75F ტემპერატურაზე ზემოთ. მოარიდეთ მზის პირდაპირ სხივებს. მაქსიმალური კონსერვაციისათვის შეინახეთ მაცივარში. არ გაყინოთ. კონსერვაციის ვადაა წარმოებიდან 24 თვე.









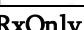


### პოლიმერიზაციის რეკომენდირებული პერიოდი

პოლიმერიზაციის რეკომენდირებული პერიოდია L.E Demetron I. 20 წამი ან Optilux 501 Boost-თან ერთად რეჟიმში -20 წამი. Ramp რეჟიმი 20 წამი ან Regular რეჟიმი 20 წამი. სხვა განათებების შემთხვევაში, რჩევა ჰკითხეთ მწარმოებელს.

(წარწერები ინსტრუქციის ბოლოს სიმბოლოებით)

შეინახეთ მშრალ ადგილას. ტემპერატურის ლიმიტი - 24 C max /75F max. შეინახეთ სინათლისგან დაცულ ადგილას. წაიკითხეთ გამოყენების ინსტრუქცია. მწარმოებელი. გამოიყენეთ---მდე. გაიცემა მხოლოდ რეცეპტით.

**სიმბოლოები**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
|   | შენახეთ მშრალ ადგილას          |
|   | იხილეთ ინსტრუქციები            |
|   | საცნობარო ნომერი               |
|   | მწარმოებელი                    |
|   | მოარიდეთ მზის სინათლეს         |
|   | ტემპერატურის შეზღუდვა          |
|   | სერიის ნომერი                  |
|   | სამედიცინო მოწყობილობა         |
|   | შენახვის ვადა                  |
|   | მხოლოდ რეცეპტით                |
|   | გამალიზიანებელი                |
|  | ერთჯერადი გამოყენების წვეროები |

**მწარმოებელი:**

**ITENA**

**ITENA CLINICAL**

[www.itena-clinical.com](http://www.itena-clinical.com)

საფრანგეთი, ვილპენტი 93420, ჟორჟ კლემენსოს გამზ. 31

ტელ.: +33(0)1 45 91 61 40

CE 0425

Ind. 3- თარიღი: 08/2020